


エアロスフィア(ビレーズトリ・ビベスピ)

デバイス各部位の名称と注意点

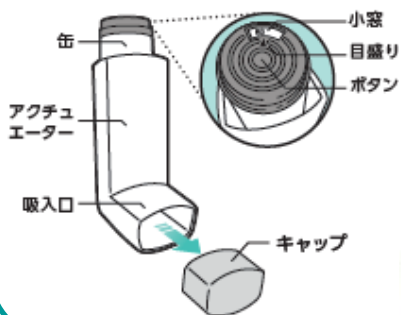

- ※ プッシュサポーター（吸入補助具）は原則使用しません
- ※ アルミ缶を人差し指と中指で支えて持ちます（上下注意）
- ※ 背筋を伸ばして胸をはりまっすぐ前を向きます
- ※ 使用終了日を本体に書いておきます

プッシュサポーターを調剤時都度添付しない場合、捨ててしまっていないか確認してください
小窓表示、アクチュエーターの洗浄についてはメーカー製リーフレットを併用してください

操作方法	ポイント
①吸入準備	 <ul style="list-style-type: none"> □ 使用回数が残っていることを確認します □ キャップを引き抜くように外します □ 吸入器をよく振ります
②息吐き	<ul style="list-style-type: none"> □ 軽く息を吐いてから吸入口をくわえます
③吸入	 <ul style="list-style-type: none"> □ 息を吸いながらボタンを押し、薬剤をゆっくり深く吸い込みます
④息止め	<ul style="list-style-type: none"> □ □から本体を離して、苦しくない程度（5秒程度）息止めます
⑤息吐き	<ul style="list-style-type: none"> □ 息をゆっくり吐き出します
⑥繰り返し	<ul style="list-style-type: none"> □ ①－⑤を指示された回数繰り返します（通常1日2回、1回2吸入）
⑦後片付け	<ul style="list-style-type: none"> □ 吸入口を拭いて、キャップを閉めます
⑧うがい	<ul style="list-style-type: none"> □ ブクブク：くちの中、ガラガラ：のど、の各3回ずつを目安にうがいをします
(初回のみ) 空うち 	<ul style="list-style-type: none"> □ 1.キャップを外し、吸入器をよく振ります □ 2.ボタンを押して空噴霧します □ 3.1と2を4回繰り返します

4回
空噴霧