

ジェヌエア（エクリラ）

操作方法	よくあるピットフォール
①薬の準備	<input type="checkbox"/> カウンターが0になっておりボタンがロックされて押せない。 <input type="checkbox"/> ボタンが上に来るように持っていない。 <input type="checkbox"/> 信号が緑色に換わるまでボタンを押し切っていない。 <input type="checkbox"/> ボタンを離していない。
②息吐き	<input type="checkbox"/> 息吐きを行っていない <input type="checkbox"/> 吐いた息をデバイスに吹きかけている <input type="checkbox"/> 姿勢が悪い
③吸入	<input type="checkbox"/> 緑色のボタンが変わっていない。 <input type="checkbox"/> 「強く、早く、深く」吸えているか <input type="checkbox"/> ボタンを離して吸っているか <input type="checkbox"/> 姿勢は正しいか <input type="checkbox"/> 息吐きできているか <input type="checkbox"/> 吸入口を隙間なく、くわえられているか <input type="checkbox"/> 吸入口を舌でふさいでしまっている。 <input type="checkbox"/> 音が聞こえた後、すぐに吸入をやめてしまう。
④息止め	<input type="checkbox"/> 息止めを行っていない
⑤息吐き	
⑥後片付け	<input type="checkbox"/> キャップを最後までしっかりはめていない。
⑦うがい	<input type="checkbox"/> うがいをしていない <input type="checkbox"/> うがいをしているが不十分